

Behelfs - Mund- und Nasenmaske

Es handelt sich um ein nicht zertifiziertes Hygieneprodukt

Kochfest, wiederverwendbar, nachhaltig, aus Öko-tex zertifiziertem Gewebe, Konfektioniert in Deutschland

Material: 100% Baumwolle, ca. 135 - 140 g/m² (G11/TB 26)

Farbe: gebleicht – optisch weiß

Größe: ca. 21 x 18 cm

Konfektion: Gummibänder an der Ober- und Unterseite, ohne Metallbügel

BEI DIESER BEHELFS - MUND-NASEN-MASKE HANDELT ES SICH WEDER UM EIN MEDIZIN-PRODUKT NOCH UM EINE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA) – DAHER IST DIESE BEHELFS - MUND-NASEN-MASKE AUCH NICHT FÜR DEN EINSATZ IM GESUNDHEITS- ODER PFLEGEWESEN, ALS ARBEITSSCHUTZ ODER SONSTIGE SCHUTZAUSRÜSTUNG ZUM SCHUTZ VOR INFEKTIONEN ODER ANDEREN SCHADSTOFFEN WIE FEINSTAUB BESTIMMT.

Wird diese Behelfs - Mund-Nasen-Maske trotz anderslautender Hinweise des Herstellers anderweitig getragen (z. B. Arbeitsschutz), dann erfolgt dies eigenverantwortlich durch den Verwender.

Wichtige Hinweise für Verbraucher:

- diese Maske ist kein Medizinprodukt oder persönliche Schutzausrüstung
- diese Maske ist nur für die private Verwendung und nicht als Schutzausrüstung vor Infektionen und anderen Schadstoffen oder für den Einsatz im Gesundheitswesen oder als Arbeitsschutz bestimmt
- die Maske bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln
- richtiges Tragen der Maske (z. B. nur über Mund und Nase tragen)
- benutzte Masken möglichst sicher vor Kontamination, z.B. im Beutel luftdicht verschlossen verwahren oder sofort waschen
- Hände (evtl. auch die entsprechende Gesichtspartie) vor und nach Absetzen oder sonstiger Berührung der Maske mit Seife waschen und/oder mit Desinfektionsmittel reinigen

Wichtige Hinweise zur korrekten Anwendung:

Vor dem ersten Tragen muss die Behelfs - Mund- und Nasenmaske zwingend sterilisiert werden, da sie nicht in einer Schutzatmosphäre hergestellt wird!

Die Sterilisation kann auf verschiedene Weisen durchgeführt werden, u.a.:

- Backofen auf 70 Grad vorheizen und die Maske 30 Minuten lang hineinlegen
- Maske in ein Gefäß mit Wasser legen und für ca. 2 Minuten in die Mikrowelle stellen
- Maske in der Waschmaschine bei 60-90 Grad waschen (mit Desinfektionswaschmittel) und anschließend bügeln

Bei dieser Behelfs - Mund- und Nasenmaske handelt es sich NICHT um eine Atemschutzmaske oder vergleichbare Schutzausrüstung (CE-Zertifizierung).



BIMATEX Textil-Marketing- und Vertriebs GmbH

Kirchbergstraße 23, D-86157 Augsburg

www.bimatex.de

Onlineshop: www.objektwaesche-shop.de

 100% Baumwolle

 100% Bombaz

Dobavitelj

 100% Bombac

Furnizor

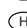
 100% cotton distributor

 100% Bavlna

Dodávateľ

 100% Cotone

 100% Bavlna Dodávateľ

 100% Pamut

Szállító

 100% Pamuk

Skuplj.: Po d. -3% Poč. -3%